




ウロマスター用 電極変更のご案内

この度「頻尿・尿失禁治療器 ウロマスター」用の電極を「テクノゲル電極 010-SR5050」から「粘着パッド ウロマスター専用 MTF-MD1」へ変更しました。本品は「ウロマスター専用」です。今後ウロマスターには「MTF-MD1 粘着パッド ウロマスター専用」のご使用をお願い申し上げます。本品は製造メーカー、品質、価格、包装、出荷単位も全く変わっていません。従来通り安心してご使用ください。

旧名称：テクノゲル電極
商品コード：010-SR5050
製造元：積水化成成品工業㈱

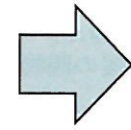

新名称：**粘着パッド ウロマスター専用**
商品コード：MTF-MD1
製造元：積水化成成品工業㈱
販売元：日本メディックス㈱

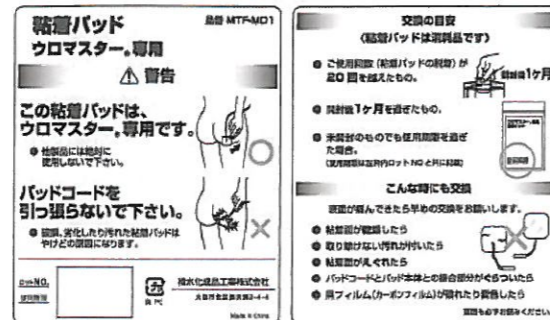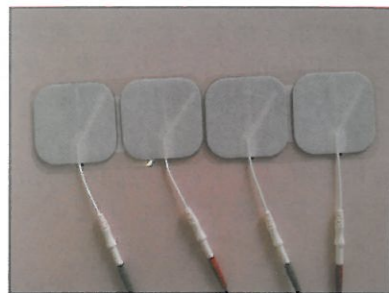

※本変更に伴い、ウロマスター機器の添付文書も変更いたしました。2012年7月1日改訂(第9版)添付文書を当社Web-商品「ウロマスター」よりPDFにてご覧いただけます。


ウロマスター 禁忌事項変更のご案内

【禁忌・禁止】

- 本機は干渉低周波 頻尿・尿失禁治療器である。他の目的に使用しないこと。
- 次のような人には使用しないこと。
 - 植込み型電子装置(例えば、ペースメーカ)を装着した患者。
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害者。
 - 温度感知喪失者。
 - 酒気を帯びた人。
 - 悪性腫瘍のある人。
 - 妊婦(胎児への影響が解明されていない)および産後の安静時(7)月経時の方。
- 次の人は介護者なしで使用しないこと。
 - 麻痺のある人。
 - 12歳以下の子供。
 - 意思表示ができない人。
- 治療部位(下腹部・下臀部)及びその周辺以外に装着してはならない。

2012年7月1日付で禁忌事項の見直しが行われました。警告事項の変更はありません。2008年5月10日改訂(第7版)-禁忌事項4)使用してはならない部位、領域、状態 では、部位が詳細に限定されていましたが、

新-2012年7月1日改訂(第9版)では、禁忌事項4)治療部位(下腹部・下臀部)およびその周辺以外に装着してはならない。となりました。また、従来の禁忌事項・禁止事項であった、4)-⑫金属製の部材を体内に留置している患者(例えば、留置針、留置鍼、骨折固定釘類)が削除されました。

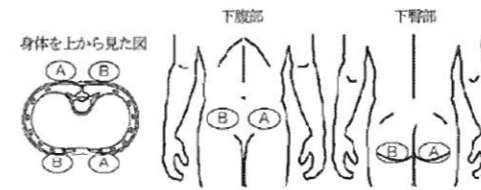

電極AおよびBそれぞれが交差する様に装着
図1：治療部位

2012年7月1日改訂(第9版)

※2012年7月1日改訂(第9版)添付文書を当社Web-商品「ウロマスター」の中よりPDFにてご覧いただけます。

ウロマスター 保守点検のご案内

保守点検は原則として治療器の使用者において、日常の医療を円滑に行うためのものである。使用者が保守点検を行うことができない場合に、当該修理区分の修理業許可を受けている修理業者または点検技術者が仕様の委託を受けて行い、保守に関して万全を期するものである。ウロマスターを安心してご使用いただくために、保守点検をお勧めいたします。弊社にご依頼下さい。

※点検項目

- 安全性について
 - 絶縁抵抗 電源入力と外装金属部間 20MΩ以上
 - 絶縁抵抗 装着部外装金属部間 20MΩ以上
 - 絶縁抵抗 装着部と電源入力間 20MΩ以上
 - 出力ゼロ開始安全機構 動作確認
- 性能について
 - 出力電流 (500Ω負荷時電流値) 個別規格
- 外観、表示、付属品について
 - キズ、フレ、サビ、変形等 目視確認
 - パネルの表示 動作確認
 - 銘盤の表示(脱落、汚れ) 目視確認
 - ツマミ、レバー等の操作性 動作確認
 - 電源コード、プラグ、ヒューズの状態 破損、亀裂
 - 導子の電極、患者コードの状態 汚損、破損
 - 患者コードと本体出力端子との接続具合 勘合状態
 - その他の付属品の状態 目視確認
 - 設置状態の確認(他の機器への影響) 動作確認
 - 設置状態の確認(他の機器からの影響) 動作確認

※定期点検料

項目	適用	料金
点検料	保守点検 一式	¥33,600(税別途)
部品料	交換を要する部品に関しては有償	
送料	株式会社メディカル・タスクフォース 負	

- 点検申込先：(株)メディカル・タスクフォース 医療機器修理業許可証 番号27BS200322
- 点検実施者：(株)日本メディックス
- 点検に要する日数：2週間程度

点検期間中の代替装置をご用意します。但し、代替装置の空き都合によって日程調整をお願いすることもあります。



※本変更に伴い、ウロマスター機器の添付文書も変更いたしました。2012年7月1日改訂(第9版)添付文書を当社Web-商品「ウロマスター」よりPDFにてご覧いただけます。

Male Urine Guardは、米国テネシー州Jackson Medical Products社の製品です。



男性軽尿失禁ポーチ “メールユリンガード”

- ◆ チョイ漏れ対策です。60ml程度の尿を吸収します。
- ◆ 前立腺手術後等のチョイ漏れに！
- ◆ ペニスの先にすっぽりとかぶせるキャップタイプです。
- ◆ ゴワゴワしない、音がしない、持ち運びにかさ張りません。
- ◆ ゴムバンドがペニスにフィット、臭いの漏れを防ぎます。
- ◆ 高吸収性パッドにより、皮膚のサラサラ感を保ちます。

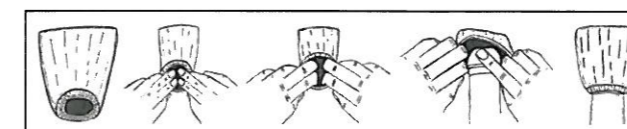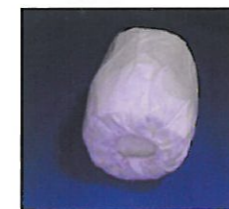

- 人さし指と中指でゴムバンドを広げます。
- ゴムバンドを広げながら人さし指を添えて挿入します。
- 挿入した後、ゴムバンドから指を外して、完了です。

¥3,600 (税込) 30個入り/袋

サンプルを同梱致しました。